

# 【miyasuku EyeConSWショートカットキー】

- 透過度を濃く: Ctrl + Alt + A
- 透過度を薄く: Ctrl + Alt + B
- 注視開始時間を短く: Ctrl + Alt + 6
- 注視開始時間を長く: Ctrl + Alt + 4
- 注視時間を短く: Ctrl + Alt + 5
- 注視時間を長く: Ctrl + Alt + 7
- 視線入力ON/OFF: Ctrl + Alt + F3
- Tobii設定(キャリブレーション): Ctrl + Alt + F5
- キーボードの切り替え: Ctrl + Alt + 8
- キーボードの拡大ON/OFF: Ctrl + Alt + F11
- 枠スキャン速度を速く: Ctrl + Alt + F8
- 枠スキャン速度を遅く: Ctrl + Alt + F6
- 十字スキャン速度を速く: Ctrl + Alt + F9
- 十字スキャン速度を遅く: Ctrl + Alt + F7
- 視線追跡を表示/非表示: Ctrl + Alt + 0
- キーボードスクロール設定: Ctrl + Alt + F12
- 設定を開く(視線OFFになる): Ctrl + Alt + 1
- 意思伝達画面の設定を開く: Ctrl + Alt + F1
- 操作パネル非表示/表示: Ctrl + Alt + F4