



# miyasuku EyeConSW

Windows  
アプリ開発 30 年  
プロフェッショナル  
の技術を結集!

スイッチコントロールで意思伝達！  
視線での操作も可能！ ※視線での操作は視線検出式入力装置を使用します！



※写真のノートパソコン固定具は基本構成には含まれません。

## 基本機能



「miyasuku EyeConSW」は、「**文字等走査方式**」を基本とした重度障害者用意思伝達装置です。スイッチを使った文字入力はもちろん、メール、環境制御等をこれ 1 台で行うことができる専用機器です。本体の電源を投入すると意思伝達機能が自動的に起動し、終了時に自動でシャットダウンされます。また、ユーザーのスキルに合わせたキーボード・パネルを多数用意しておりますので、自分に最適な方法でご利用頂けます。

## 視線の活用

入力の基本は「**スイッチ**」で行う文字等走査方式ですが、「**視線検出式入力装置**」を接続することで、視線を使った操作も可能になります。「**スイッチと視線を組み合わせて使う**」、「**視線だけで使う**」等、視線を使うことで更に簡単に素早く文字入力ができますので、本来のコミュニケーションにより近い意思伝達が可能になります。このような「**3 種類**」の使い方を簡単に使い分けながら利用することができるのです。

## 選べる！作れる！あなただけのキーボード

活用シーンによって、標準で用意されているキーボードから選んだり、キーボードをカスタマイズできます。

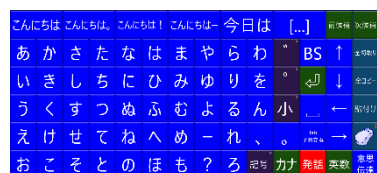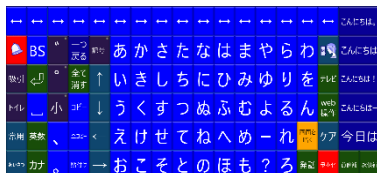

【スキャン操作/LINE キーボード】 【スキャン操作/多機能キーボード】 【視線操作/予測変換キーボード】

# 基本操作(文字入力)

## 【スイッチだけで使う】



- ① 文字盤上で、枠（色変更可）が一行ずつ順に自動移動します。（この画像では、「ま」の列を通っているところ）
  - ② 入力したい文字の列にきたタイミングでスイッチを押します。
  - ③ 列を選択すると、枠が縦に一文字ずつ移動しますので、入力したい文字まで待ってスイッチを押します。
- このように、基本操作は「待つて押す、待つて押す」の繰り返しです。

## 【スイッチと視線を組み合わせて使う】



入力したい文字上に視線がきた時に、スイッチを押して決定します。（この画像では、ユーザーが「て」を見ています）


- ① 自分が見ている文字に枠（色は変更可）が付きます。
  - ② 入力したい文字に枠（色は変更可）が付いている時にスイッチを押します。
- この操作だけで文字が入力できますので、慣れれば一番速くて楽な入力方法です。

## 【視線だけで使う】




視線を動かして、一定時間「注視」することで文字を決定します。（この画像では、ユーザーが「ん」を見ています）

- ① 入力したい文字を見ます。
  - ② そのまま入力したい文字を注視します。
- 感度・注視時間等、細かい設定ができますので、ご自分に合った値に設定しておくと、更に使い易くなります。

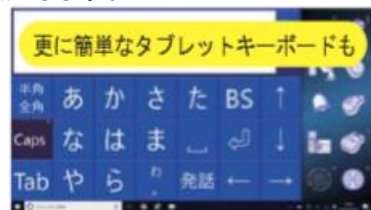

## 【便利な機能の紹介(一部)】

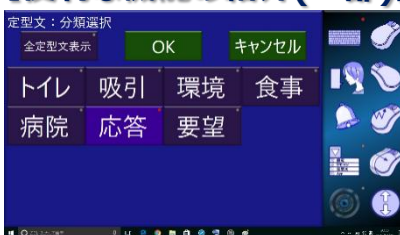

**【定型文機能】**  
予め、よく使う語句や  
お願い事を登録して  
おけば、より速く  
伝えることができます。



**【予測変換機能】**  
スマホ等の日本語入力機能  
と同じです。  
一文字入力すると、よく使う  
候補が自動的に表示され、  
選択できます。

## 重度障害者用意思伝達装置「miyasuku EyeConSW」価格・基本構成

**【価格】504,000円(非課税) [2024年11月バージョン]**

※プリンタを必要としない場合は、定価488,000円(非課税)です

※補装具支給制度が利用可能です(制度利用には条件があります)

**【付属品】本体一式(ノートPC含む)・専用スイッチボックス・学習リモコン・プリンタ**

### 動作環境・本体仕様

**【本体仕様】Microsoft Windows 11 / 15.6インチ液晶 / Core i5相当 / メモリ8GB / SSD256GB / USB3.0**

**【視線検出式入力装置】Tobii PCEye5 : 220,000円(税別)**

※パソコン本体・視線検出式入力装置の故障による修理保証は、1年間とします(破損・水濡れ等、お客様の過失による場合を除きます)。

※本システムは現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本システムに関して一切保証しません。

本システムに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

Microsoft Windows は、Microsoft 社の米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

miyasuku(みやすく)は、広島弁で「易しい・簡単に」という意味。障がいのある方が「みやすく」生活できる。そんな夢を実現する広島発のプロジェクトです！



開発元：株式会社ユニコーン 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南一丁目27番20号

miyasuku サポート係 / E-mail : [info@miyasuku.com](mailto:info@miyasuku.com) Tel : 082-819-0230

URL : <https://www.e-unicorn.co.jp/miyasukutop> Facebook : <https://www.facebook.com/groups/746997405664366/>

※製品仕様は予告なしに変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

Copyright UNICORN Limited 2015-2024